



INFORMATIONS POUR LES PODOLOGUES

PROPAGATION DES ONDES DE VIBRATIONS À PARTIR DU PIED :

Elles se propagent principalement sous le calcanéum et à la base des métatarsiens. On note des répercussions au niveau de la malléole externe, du plateau tibial et de son compartiment interne, au niveau de la tête du péroné, et 1/3 moyen du tibia, des condyles fémoraux.

CONSÉQUENCES :

- Fractures de fatigue (petits chocs répétés).
- Périostites (vibrations sur les structures osseuses) sésamoïdites.
- Douleur au niveau du genou, des hanches, rachialgies, voire à l'étage supérieur.

EXEMPLES D'UTILISATION DU NOENE® PAR LE PODOLOGUE

• NOENE® 1 et 2 mm (ref PLN0T1 et PLN0T2) : sert de base

- **Chez le senior** : base de semelle entière en incluant la correction des troubles statiques si nécessaire (moins de fatigabilité à la marche).
- **En rhumatologie** : base 1/2 ou 3/4 avec éléments de correction.
- **Pour les métiers nécessitant une station debout prolongée** : base avec éléments de correction des troubles statiques et dynamiques.
- **En post chirurgical.**
- **Sur les séquelles d'entorse avec arrachement osseux.**

• NOENE® 1 et 2 mm (ref PLN0S1 et ref PLN0S2) : recouvrement, inclusion, semelles posturales

- **En recouvrement d'une orthèse** moulée + tissu intissé ou autre, (atrophie du capiton plantaire).
- **En inclusion dans les orthèses** sous les métatarsiens (pied creux ou rigide).
- **En base 1/2, avec prolongement** du 1er rayon + éléments pour pieds valgus ou hallux valgus, chez les femmes actives portant des chaussures fines, permet des orthèses posturales associées à des éléments fermes.
- **Inclusion sous l'arrière pied** sur base NOENE® PLN0T2 (aponévrosite, épine calcanéenne...).

• NOENE® 4 mm (ref PLN0T4)

- **En talonnette de compensation**; peut être rajouté aux autres références.
- **Pour correction des tensions au niveau du tendon d'Achille**, suivant les modèles de chaussures.
- **Pour raccourcir la chaîne** postérieure sans instabilité.

• NOENE® 4 mm (ref PLN0S4)

- Même indication que la référence PLN0T4. Plus souple mais ne provoquant pas d'instabilité.
- Peut être utilisé chez les enfants pour la maladie de Sever.

• En sport

- Le NOENE® peut être utilisé en base, en inclusion, ou en recouvrement d'orthèses moulées.

CONCLUSION

Ces indications sont données à titre informel. Seul le praticien, en choisissant parmi les différentes références mises à sa disposition, est à même de répondre au mieux aux attentes de ses patients.

PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE ET D'USAGE

Afin d'éviter toute bio contamination, il est recommandé de suivre les bonnes pratiques de stockage et transformation en milieu hospitalier, ou en cabinet de podologie sous la responsabilité du professionnel de la Santé. A stocker dans un endroit propre, sec et aéré, à l'abri de la lumière et éloigné de tout polluant, source de chaleur et nourriture.

INFORMATIONS POUR LE PATIENT :

Les semelles et/ou orthèses qui leur ont été confectionnées sont destinées à un usage individuel et sont prévues pour être nettoyées quand nécessaire, à la main, à l'eau tiède et savon de Marseille. Il est important de leur recommander aussi d'éviter de les porter au contact d'une peau lésée, de les utiliser avec des chaussettes, de porter face tissu ou cuir ou simili côté pied, face élastomère côté chaussure, et enfin de porter avec des chaussures de pointure adaptée.

NETTOYAGE :

Il est conseillé d'utiliser un désinfectant reconnu en milieu hospitalier.

COMPOSITION :

NOENE® : 100 % élastomère - Tissu non tissé : 100 % polyester.

NOENE®: AVANTAGES & INCONVÉNIENTS

Depuis plus de 25 années NOENE® est produit de manière semi-artisanale, il faut toujours environ une heure pour réaliser 4 à 6 mètres carré de Noene, et ce suivant son épaisseur.

Malgré toute notre attention, nos précautions et notre expérience il subsiste toujours quelques imperfections, micro bulle d'air et minimes variations d'épaisseurs.

Ces petits inconvénients sont une des caractéristiques typiques de la matière première NOENE® qui ne compromet en aucun cas la qualité et l'efficacité intrinsèque de ses capacités exceptionnelles d'amortissement.


Il est d'ailleurs impossible de produire du NOENE® sans ces petites et occasionnelles imperfections, qui sont d'ailleurs garant de son authenticité.

Méfiez vous toujours des contrefaçons car NOENE® a été bien souvent copié depuis plus de 25 ans, mais à ce jour jamais égalé.

Merci de votre compréhension et fidélité à la marque.



SIDAS MEDICAL
PA Champfeuillet EST
18, Léon Béridot - BP 353
38 500 VOIRON CEDEX FRANCE
ph. +33 (0)4 76 67 07 07
info@sidas.com
www.sidas.com

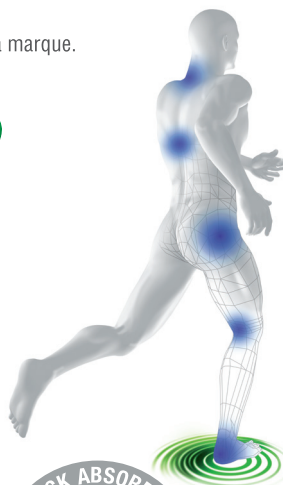

Av. d'Arraona, 119-123
08210 Barberà de Vallès · Barcelona - Spain

